

MOBILETTO ATTREZZATO WC PER DISABILI



MANUALE TECNICO

MODELLI DISPONIBILI :

CODICE	DESCRIZIONE
TN3400	MOBILETTO ATTREZZATO CON WC- CASSETTA CON SCARICO PNEUMATICO AGEVOLATO –SEDILE APERTO IN P. P.
TN3410	MOBILETTO ATTREZZATO CON WC-MISCELATORE TERMOSTATICO-DOCCETTA USO BIDET-CASSETTA CON SCARICO PNEUMATICO AGEVOLATO –SEDILE APERTO IN P. P.
TN3420	MOBILETTO ATTREZZATO CON WC-MISCELATORE TERMOSTATICO-DOCCETTA USO BIDET-CASSETTA ELETTRONICA A FOTOCELLULA E CON SCARICO PNEUMATICO AGEVOLATO –SEDILE APERTO IN P. P.



Avvertenze preliminari

- L'installazione deve essere eseguita da personale Qualificato.
- L'assistenza a questo prodotto deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato.
- Usare ricambi originali. Non alterare o modificare le caratteristiche del prodotto.

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia per 12 mesi dalla data di acquisto Conservare il documento fiscale comprovante la data di acquisto (ricevuta fiscale).


- Non utilizzare per la pulizia prodotti contenenti solventi, abrasivi, agenti corrosivi acidi o alcalini.
- Questo manuale è di proprietà dell'utilizzatore e deve essergli consegnato al termine dell'installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	48 Kg	Materiale rinforzo	Poliestere
Dimensioni in mm	1100X620X750	Telaio	Acciaio zincato a caldo
Materiale	Resina poliestere finitura gel coat	Scarico	Universale

PREDISPOSIZIONE E DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: PREVEDERE I PUNTI IDRAULICI ED ELETTRICI IN FUNZIONE DEL MODELLO DI MOBILETTO COME INDICATO DALLO SCHEMA.

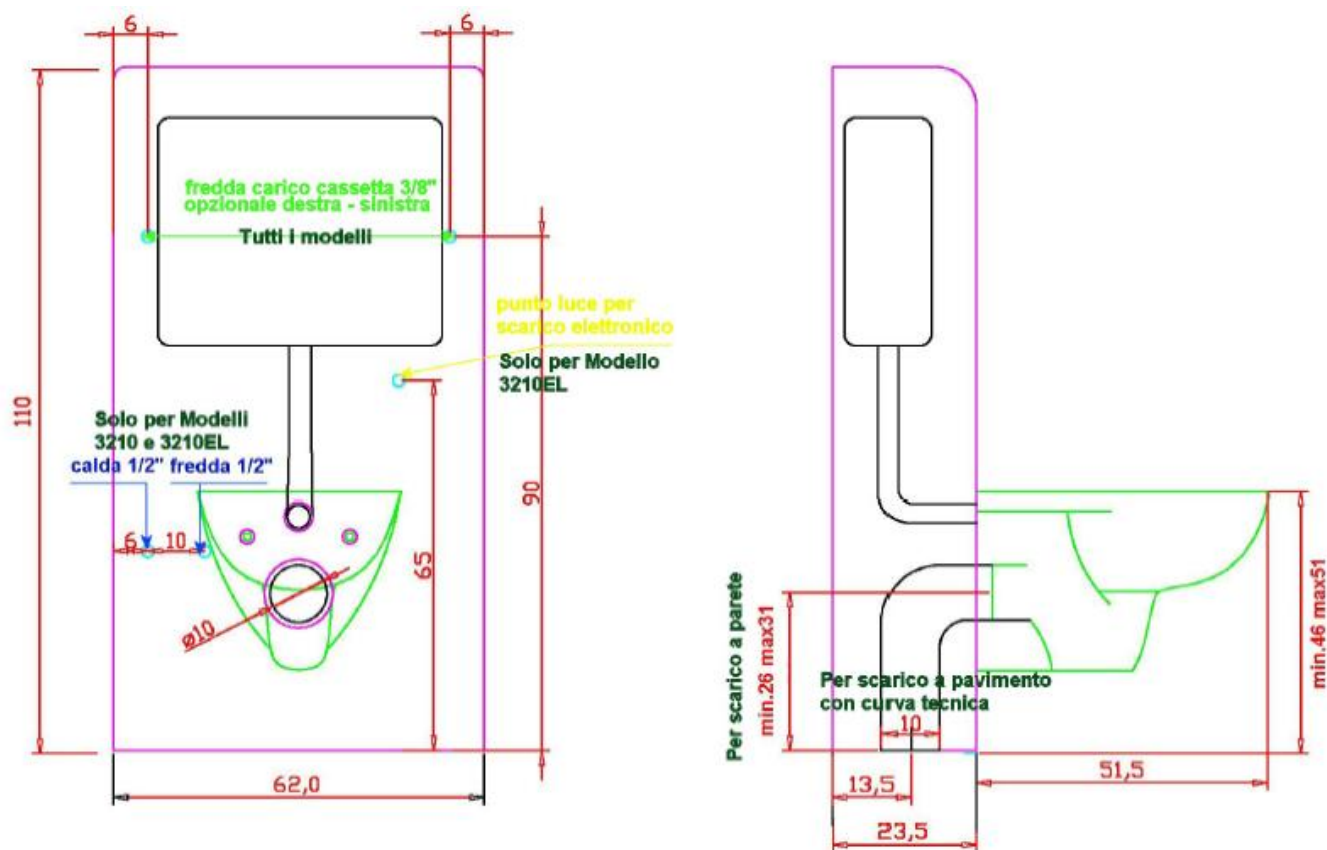

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

• **ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO (INSTALLAZIONE USO).**

• **IL RISCHIO DI IPERTERMIA E DI SCOTTATURE, CON L'ACQUA A TEMPERATURE SUPERIORI AI 38°C PUÒ ESSERE PERICOLOSA PER LA SALUTE, CONTROLLARE SEMPRE E CORREGGERE LA TEMPERATURA PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA DOCCETTA.**

• Pericolo! Per ridurre il rischio di ferite e danni, non permettere a bambini od a persone con infermità di usare questo prodotto senza che siano controllati ed assistiti per tutto il tempo necessario.

- Non far cadere o infilare oggetti in nessuna apertura!
- Mantenere pulito il pavimento per evitare scivoloni o cadute.
- In caso d'inidoneità dell'ospite il funzionamento dovrà essere controllato dall'assistente.
- Non aprire l'acqua e lasciare la stanza, per evitare rischi di allagamento!



PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

APERTURA DELL'IMBALLO

- Controllare il cartone, se l'imballo é danneggiato:
- In caso positivo , effettuare una fotografia; avvisare il trasportatore od il rivenditore entro 8 giorni;
- **NON SOLLEVARE MAI IL PRODOTTO DALLE TUBAZIONI,CARTER etc.** In caso di perdita sarà esclusiva responsabilità dell'idraulico.
- Se l'imballo é in buone condizioni, ispezionare immediatamente il mobiletto .
- Una volta installato, eventuali superfici danneggiate saranno considerate effetto dell'installazione, non soggette a garanzia.
- Controllare che tutti i pezzi necessari siano presenti nella confezione.
- Rimuovere tutti gli imballi protettivi.
- Preparare la superficie dove il mobiletto deve essere installato, controllare la planarità,
- Controllare che non vi siano tubazioni o altro nella parete dove sarà installato.
- .Eventuali movimenti del pavimento, o pavimenti non in piano potrebbero causare difficoltà.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Appoggiare il telaio metallico alla parete dove dovrà essere installato il mobiletto, tendo in centro lo scarico a parete o a pavimento predisposto per il wc.
2. Regolare i piedini (1) e livellare il telaio avendo cura di lasciare lo spazio necessario per la carena inferiore.
3. Segnare a parete i fori (2)
4. Togliere il telaio praticare 4 fori alla parete idonei ai tasselli utilizzati (Per sicurezza si consiglia l'utilizzo del tassello chimico).
5. Posizionare nuovamente il telaio sulla parete e fissare.
6. **(Solo per modelli 3410 e 3420)** Smontare dalla carenatura inferiore in vetroresina i tappi filettati, predisporre il miscelatore termostatico e montarlo a mezzo eccentrici fissandolo con i dadi (4)
7. **(Solo per modelli 3410 e 3420)** montare un te sul lato acqua fredda per derivare il carico della cassetta, eventualmente anche una valvola di arresto (non fornite)

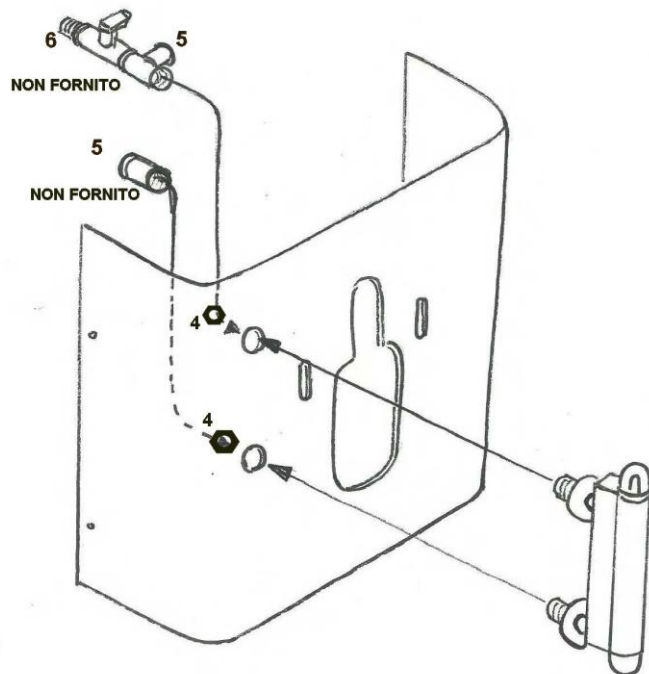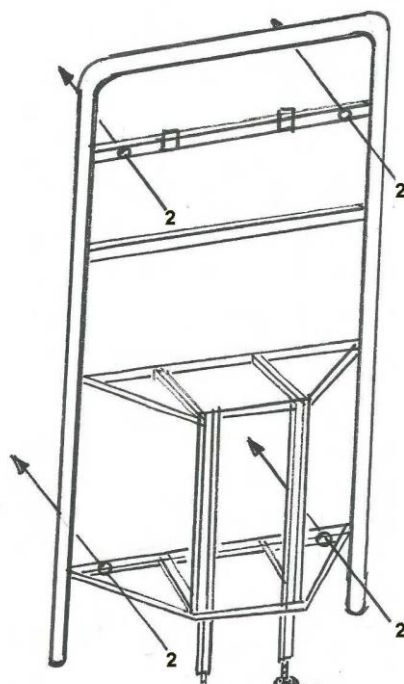

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


8. Agganciare la cassa di scarico (8) ai supporti 10.
9. Assemblare il gruppo carenato inferiore sul telaio e fissare con le viti (7)
10. Allacciare il carico della cassetta all'acqua fredda utilizzando un flessibile o tubazione di plastica, rame etc. (NON FORNITA)

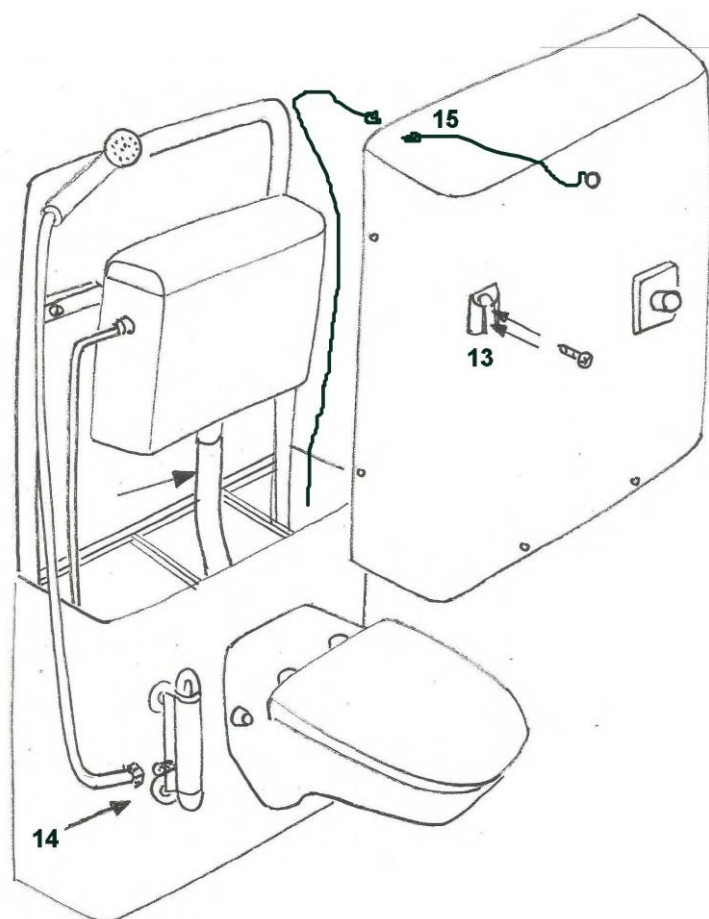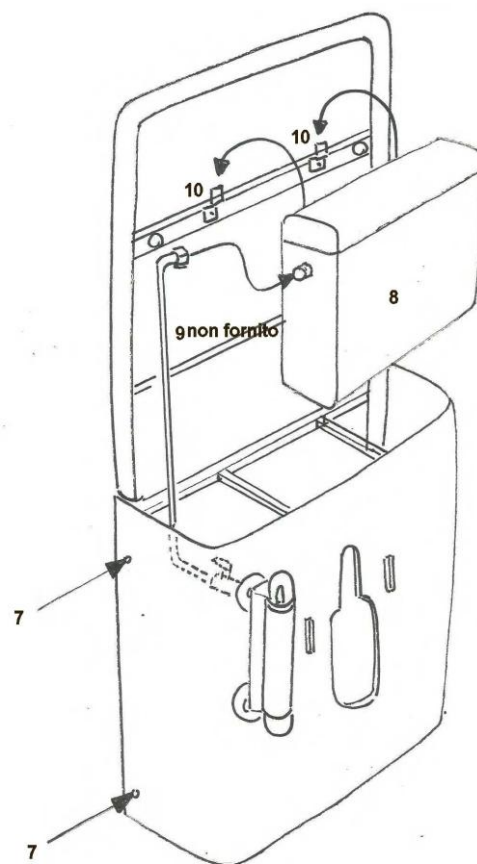

11. Montare sul carter superiore il supporto doccia in ABS
12. SOLO PER MODELLO ON SCARICO ELETTRONICO: montare il sensore tondo nel foro, dopo avere rimosso il tappo tecnico, collegare il cavetto 15
13. Collegare la doccetta al miscelatore termostatico (se il modello lo prevede)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

11. Completare il montaggio del pulsante Pneumatico(17)(fissaggio/allineamento)
12. Fissare il carter superiore così completato al telaio con le viti (18)
13. Montare il wc sul mobiletto tramite i bulloni, interponendo le rondelle in plastica e metallo, collegando la alimentazione della cassetta e dello scarico.

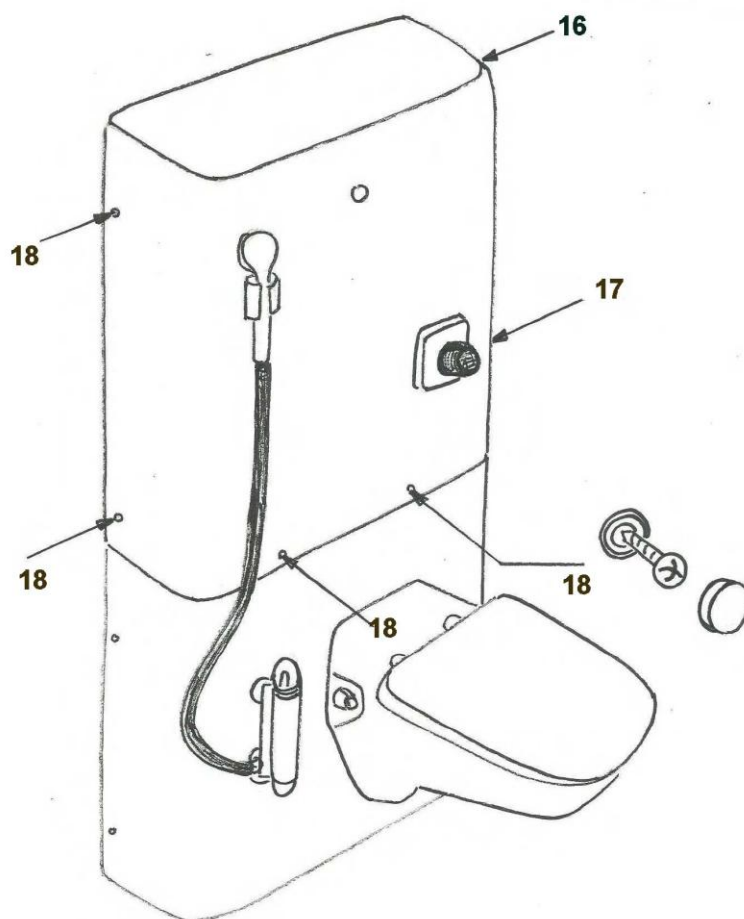

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Non usare abrasivi, perché graffieranno ed offuscheranno la superficie della vetroresina. Lo stucco od il silicone possono essere rimossi usando un utensile di legno.
2. Un detersivo delicato è adatto per rimuovere i residui di costruzione. I residui più ostinati possono essere rimossi con alcool denaturato. Le graffiature e le zone opacizzate possono essere ristabilite a lucido originale lucidando con polish di tipo automobilistico.